

Fassisi - niemiecki producent testów immunologicznych

Nazwa testu	Wykrywa	Próbka	Gatunek
PiDia Plus Szybki test biegunkowy dla prosiąt	• Rotawirus • Clostridium perfringens • α toksynę Clostridium perfringens • Cryptosporidium parvum	Kał	
BoDia Szybki test biegunkowy dla cieląt	• Rotawirus • Koronawirus • E.coli K99 • Cryptosporidium parvum	Kał	
Tropo Szybki test wykrywający podwyższony poziom Troponiny I u koni	• Troponinę I	Krew, osocze	
ParCo Podwójny test wykrywający parwo- i koronawirozę u psów	• Parwowirozę psów • Koronawirozę psów	Kał	
FelFIV Podwójny test wykrywający białaczkę i niedobór immunologiczny kotów	• Wirus niedoboru immunologicznego kotów • Wirus białaczki kotów	Krew, osocze	
BoTick Test wykrywający obecność bakterii Boreliozy u kleszczy	• Bakterie wywołujące boreliozę (Borrelia burgdorferi sensu lato)	Kleszcz	



Użyj pipety z zestawu i pobierz rzadki kał



Otwórz tubkę testową



Do tubki testowej dodaj od 5 do 8 kropli badanego materialu.



Potrząśnij tubkę. Następnie zdejmij białą nakrętkę i odłóż zabezpieczenie tubki.



Nanieś 3-4 krople roztworu do każdego oczka kontrolnego



Wynik pozytywny: pojawiają się dwie linie

Wynik negatywny: pojawia się tylko linia kontrolna

Tylko w dobrych hurtowniach

Pieczętka hurtowni



Dostępne są również testy diagnozujące i wykrywające:

- Nosówkę psów,
- Dirofilariozę psów,
- Leiszmaniozę psów,
- Chlamydiozę kotów,
- Aflatoksynę B1,
- Troponinę I u psów

Scope Electric

FASSISI

PortaCheck, Inc.